


# *Tutustu Daisy-soittimeen!*

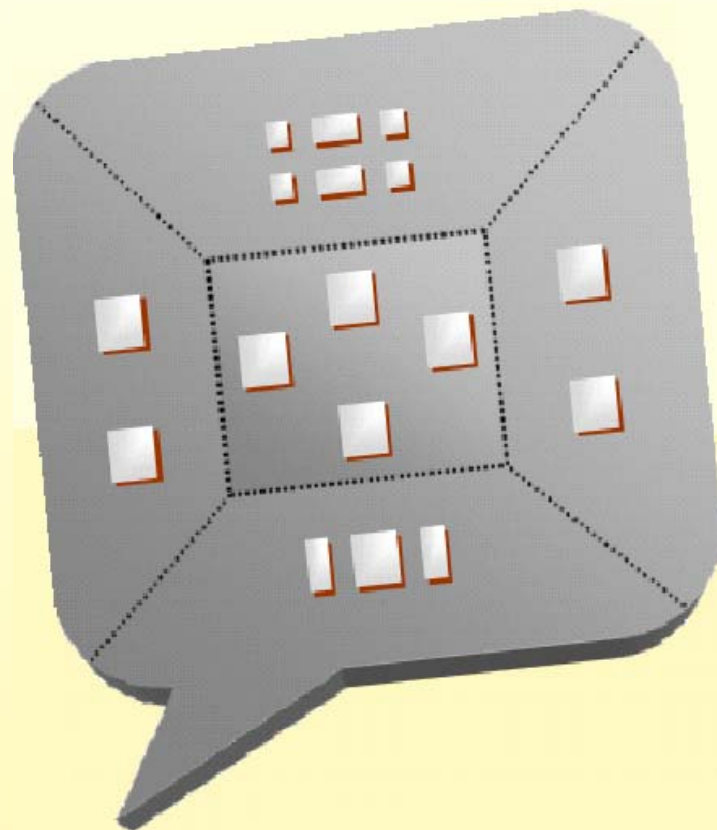

**NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY**




# *Daisy-julkaisut*

- **Äänikirjat, -lehdet, oppaat, tiedotteet**
- **Äänen lisäksi kuvia, piirroksia, taulukoita**
- **Tiedostot MP3-muotoisia**
- **Jakelu CD-levyillä tai verkon kautta**
- **Daisy-julkaisuja voi lukea Daisy-kuuntelulaitteilla, tietokoneilla ja joillakin MP3-soittimilla**

# **Daisy-kuuntelulaite**

- Useita eri malleja
- Toimii verkkovirralla ja akulla
- Lukee CD:lle tallennettuja Daisy-julkaisuja
- Lukee ja soittaa myös muita CD-levyjä, esim. musiikkia
- Laitteen avulla voi selata äänikirjoja
- Lukemisen aikana voi asettaa kirjanmerkkejä


# Daisy-soittimen toiminnot perusmalleissa

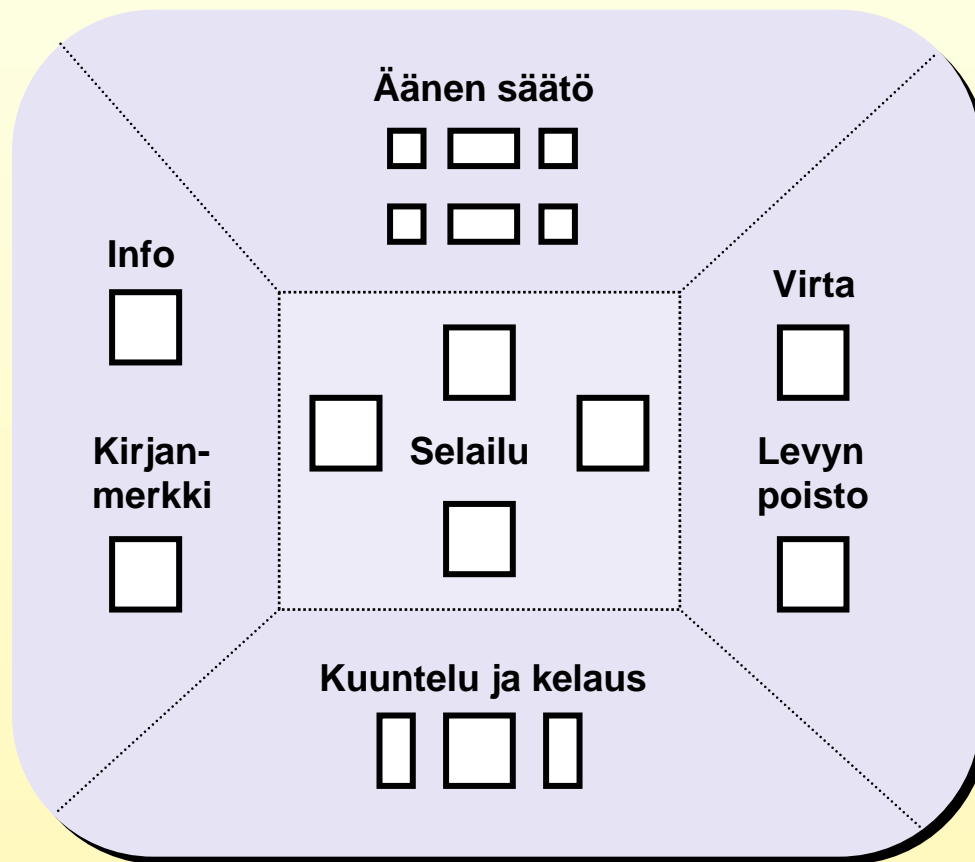

- Daisy-soittimen opasääni kertoo kunkin painikkeen kohdalla, mikä toiminto on kyseessä.


# Painikkeiden sijainnit ja käyttö:

## Lohko 1 – virtakytkin ja levyn poisto

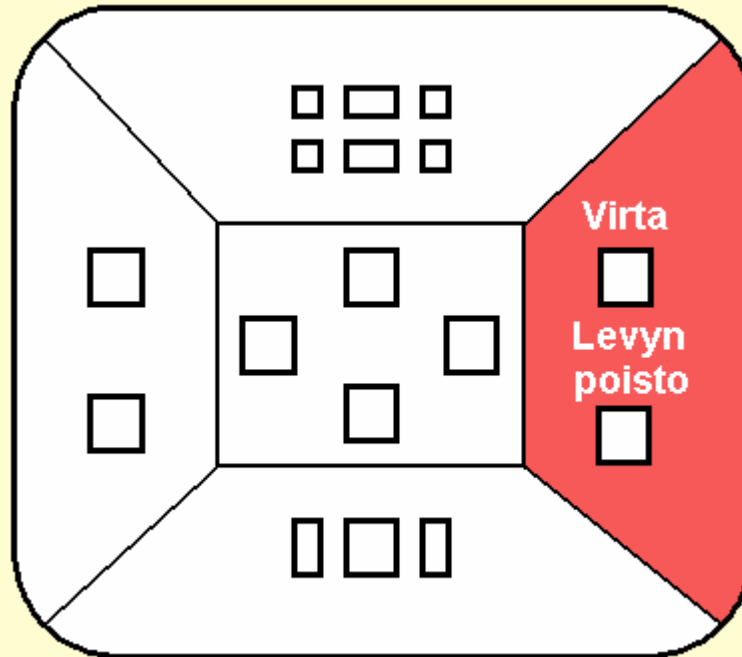


- Ensimmäinen lohko sijaitsee laitteen oikassa laidassa. Siihen kuuluu kaksi painiketta. Ylempää painamalla laitteeseen kytkeytyy virta. Virran katkaisu tapahtuu samasta painikkeesta. Pidä nappia pohjassa aina niin pitkään, että kuulet äänimerkin.
- Alempaa painiketta painamalla voit poistaa levyn koneesta. Virran täytyy olla silloin kytkettynä.

## Lohko 2 – Kuuntelu, pysäytys, pikakelaus

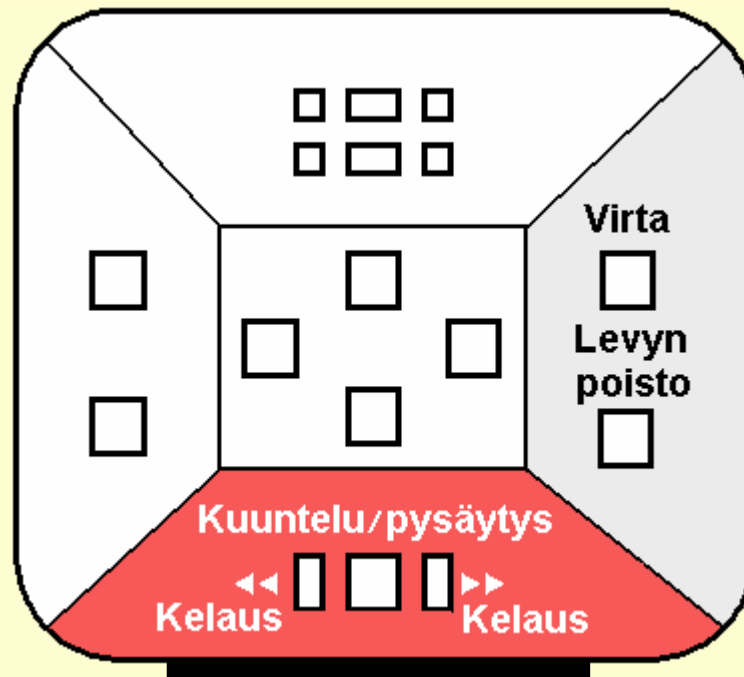


- Kun virta on päällä, voit asettaa CD-levyn laitteeseen etureunan aukosta.
- Laitteen alalaidassa on kolmen painikkeen ryhmä. Keskimmäinen on muita suurempi ja sitä painamalla voit käynnistää ja keskeyttää kuuntelun.
- Suuren painikkeen vasemmalla puolella on pikakelaus taaksepäin ja oikealla puolella pikakelaus eteenpäin. Painiketta pidetään pohjassa kelauksen ajan.

## Lohko 3 - Äänen voimakkuus, puheen nopeus, äänen sävy

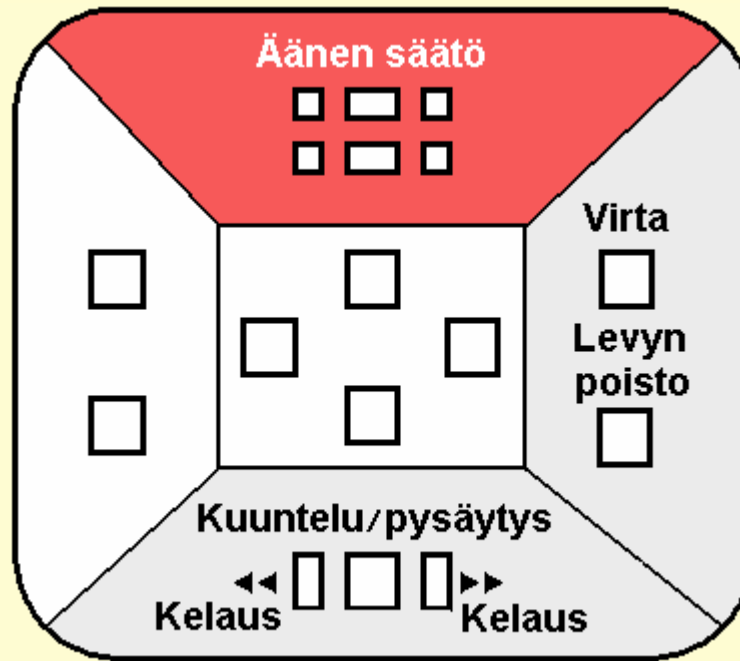

- Laitteen ylälaudassa on kuuden painikkeen ryhmä, jolla hallitaan äänen ominaisuuksia. Kaksi keskimmäistä ovat muita suurempia ja niillä säädetään äänen voimakkuutta. Ylempi voimistaa ääntä ja alempi hiljentää.
- Suurten painikkeiden oikealla puolella olevat painikkeet säätelevät puheen nopeutta. Ylempi kasvattaa sitä ja alempi vähentää.
- Suurten painikkeiden vasemmalla puolella olevat painikkeet säätelevät äänen sävyä. Ylempi kirkastaa sitä, alempi madaltaa.


## Lohko 4 – Informaatio ja kirjanmerkki

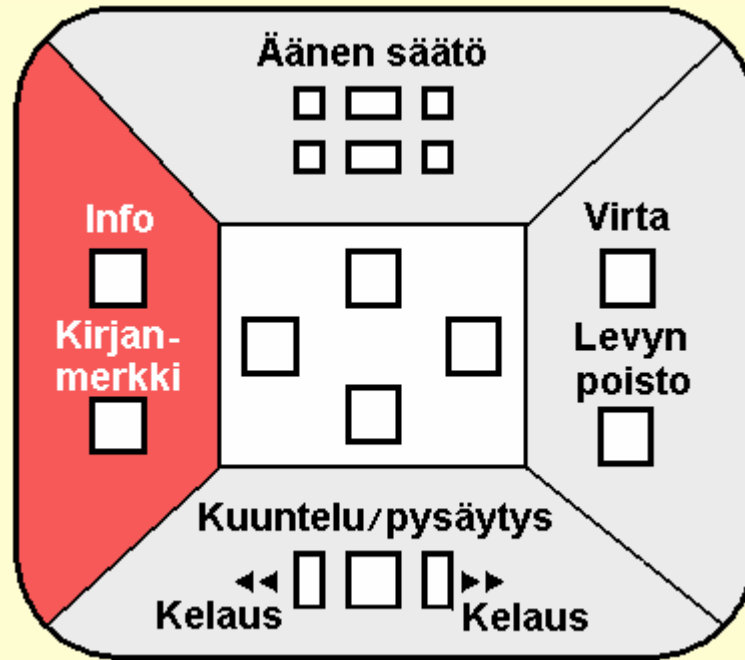

- Laitteen vasemmassa laidassa on kaksi erillistä painiketta. Ylempi on Info-nappi, jota painamalla saat tietoja mm. kuunteluajasta, kirjan pituudesta ja akun latauksesta.
- Alempaa painiketta painamalla voit asettaa lukemisen aikana kirjanmerkkejä kohtiin, joihin haluat palata myöhemmin.



## Lohko 5 – Selailu eli liikkuminen kirjan eri osien välillä

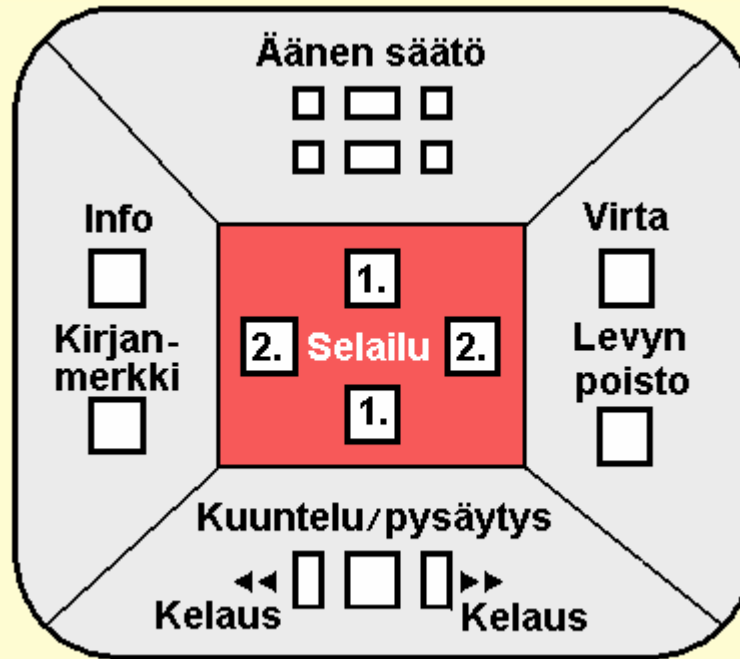


- Laitteen keskiosassa olevilla selauspainikkeilla voit liikkua kirjan osasta toiseen ilman kelausta. Neljä painiketta on asetettu kompassin muotoon.
- Selailun vaihe 1: Pohjoispainike ylinnä ja eteläpainike alinna kuljettavat sinua valikossa, jossa valitaan taso tai muu selailuelementti.
- Selailun vaihe 2: Länsipainike vasemmalla siirtää taaksepäin valitulla tasolla. Itäpainike oikealla siirtää vastaavasti eteenpäin. Tasoista kerrotaan enemmän seuraavassa diassa.

# *Daisy-julkaisurakenteen tasot*

- Daisy-julkaisut on mahdollista jäsenellä siten, että sisältö jaetaan usealle tasolle. Esimerkiksi kirjan luvut voivat muodostaa yhden tason ja alaluvut toisen jne. Joissakin julkaisuissa voi lisäksi olla sivunumeroiden jäsentely.
- Se, miten tasot on rakennettu eri teoksissa, vaihtelee. Julkaisun tuottajan tulisi kertoa jäsentelytapa äänitteen alussa.
- Selailupainikkeita painettaessa opasääni luettelee tasojen numeroita. Se mainitsee vain ne tasot, jotka juuri siinä julkaisussa esiintyvät.
- Seuraavassa diassa on kaavakuva, joka esittää rakennetta, jossa on kolme tasoa.

# Liikkuminen Daisy-tasoilla

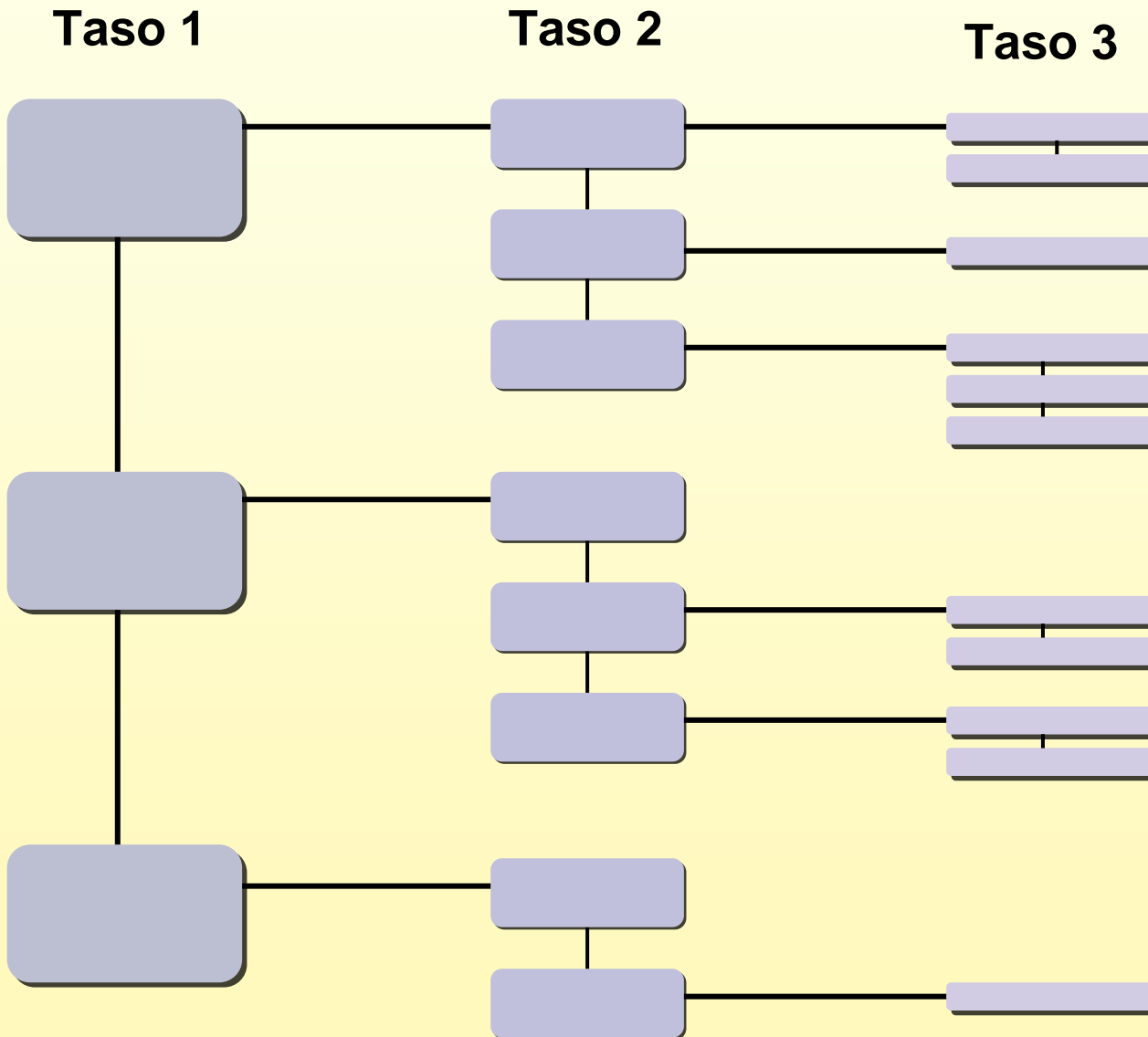

# **Daisy-soittimen pikaohje**

- 1. Kytke laite verkkovirtaan ja paina virtanappia laitteen oikeassa reunassa. Jos akku on ladattu, voit kuunnella myös ilman verkkovirtaa.**
- 2. Työnnä CD-levy sisään laitteen etuosan litteästä aukosta. Jos levy on väärinpäin, laite ilmoittaa virheestä ja työntää levyn ulos.**
- 3. Daisy-soittimen opasääni kertoo, mikä kirja tai muu julkaisu levyllä on.**
- 4. Kuuntelu käynnistyy automaattisesti tai painamalla kuuntelupainiketta alarivissä keskellä.**
- 5. Voit keskeyttää kuuntelun painamalla samaa kuuntelupainiketta. Daisy-soitin muistaa, mihin kohtaan jäit, vaikka katkaisisit virran ja poistaisit levyn välillä. Levyn voi poistaa vain virran ollessa päällä.**
- 6. Sammuta virta käytön loppuksi.**